

Załącznik.

Głowice ultradźwiękowe + sonoforeza

Ultradźwięki to drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej słyszalność ucha ludzkiego (powyżej 20kHz). Ciepło wytworzone przez ultradźwięki podczas zabiegu głęboko penetruje tkanki, odpręża skórę i mięśnie, a głęboki mikromasaż poprawia przepływ krwi i limfy, metabolizm i regenerację komórek. Ultradźwięki emitowane są przez głowicę, którą wodzi się po skórze zwilżonej specjalnym żelem umożliwiającym przenikanie ultradźwięków w głąb tkanki. Zwiększa się też przepuszczalność błon komórkowych. Proces ten wykorzystuje się to do wprowadzania w głąb skóry wielu substancji czynnych.

Dane techniczne

Częstotliwość 1MHz

Moc 1W /cm²

Wyposażenie aparatu

Głowice ultradźwiękowe, kabel zasilający, elektroda, opaska z elektrodą.

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania

Sprzęt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i może być używany tylko przez profesjonalistów odpowiednim przygotowaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym posługiwaniem się sprzętem. Aparat jest zasilany napięciem z sieci. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru. Każde uszkodzenie należy niezwłocznie zgłosić do serwisu.

Przygotowanie urządzenia do pracy

1. Ustaw aparat na płaskiej stabilnej powierzchni.
2. Podłącz przewód sieciowy do aparatu i gniazdka sieciowego.
3. Podłącz głowice do gniazda.
4. Włącz aparat przyciskiem z tyłu.
6. Ustaw właściwe parametry.
7. Aparat jest gotowy do pracy.

Kroki do rozpoczęcia pracy urządzenia

Istnieją dwa sposoby ustawiania funkcji:

1. Szybki – z automatycznym ustawieniem parametrów.


1.1. Klawiszem sterującym wybierz funkcję ultradźwięki na twarz lub ciało i naciśnij start. Pojawi się ekran roboczy.

1.2. Urządzenie jest gotowe do pracy. Włączenie start rozpoczyna zabieg, w trakcie możemy klawiszami sterującymi regulowac...

2. Ręczne ustawienie parametrów.

2.1. Klawiszem sterującym wybierz funkcję ultradźwięki na twarz lub ciało i zatwierdź

klawiszem menu.

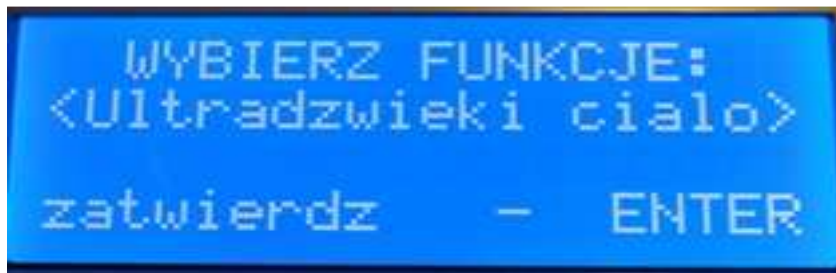

2.2 Klawiszem sterującym ustaw czas zabiegu – zatwierdź klawiszem menu.




2.3. Klawiszem sterującym ustaw puls - zatwierdź klawiszem menu.




Możesz pracować bez pulsacji, w tym celu zatwierdź klawiszem menu puls OFF.

2.4. Klawiszami sterującymi ustaw natężenie prądu galwanicznego - zatwierdź klawiszem menu.

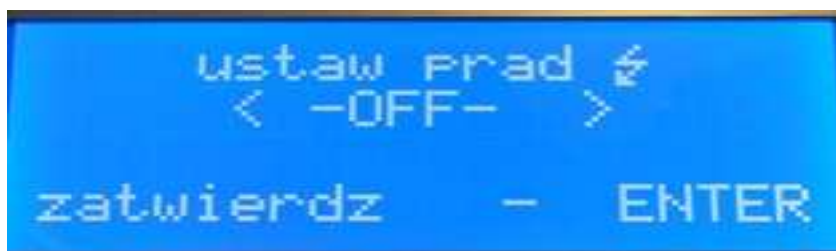

2.5. Ekran roboczy.

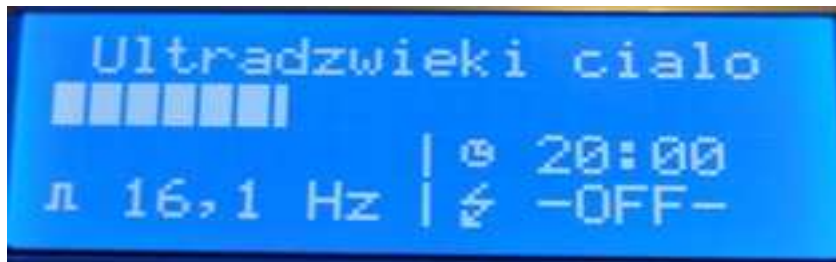

2.6. W celu rozpoczęcia zabiegu naciśnij start. W dowolnym momencie możesz przerwać zabieg włączając klawisz stop. Zegar zatrzyma się, a po ponownym włączeniu start możesz kontynuować pracę bez konieczności regulacji parametrów.